

8. 検体搬送方法

検体搬送とは、お客様の元から弊社まで検体を搬送することを指します。本項では、検体搬送方法について説明します。マイページでの操作は不要です。

8. 1. 医療機関のお客様

弊社にて検体搬送を実施します。

8. 2. 医療機関以外の団体のお客様

弊社まで検体を郵送してください。検査キットの構成部品を図 4 に示します。別途、黒のボールペン、アルコール消毒液、ガムテープ（輸送用コンテナを使用する際）を準備してください。手順については A～C を参照してください。




- ✓ 検体採取は①～③までの資材を使用します。
- ✓ ④、⑤の資材は、検体搬送で使用します。

図 4 検査キット構成部品

A) UN3373 輸送ボックスの組み立て方

下図のとおり UN3373 輸送ボックスを組み立ててください。

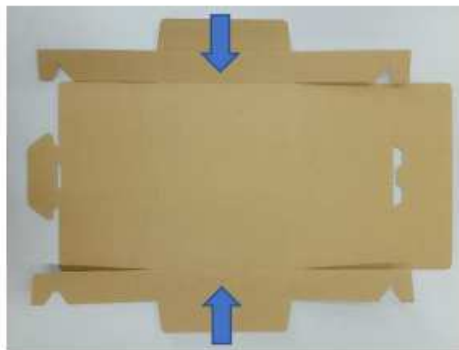

①折線に合わせて折り、立たせます。



②立たせた両側にある羽を内側へ折り込みます。



③羽の先にある爪同士を引っかけます。
反対側も同じように組み立ててください。



④残りの部分が蓋となるため、返送する
検体を入れてください。



⑤手前の翼を反対側のすき間に差し込んで
蓋を閉じます。

蓋を閉めた時に、輸送ボックスに浮きが無いか確認してください。浮きがあると高さが30 mmを超えてしまい、郵送料金が高くなる場合があります。

※蓋を完全に閉じてしまうと箱を開けることができなくなるため、閉じる前に検体の入れ忘れがないか確認してください。

なお、UN3373 輸送ボックスには、1 検体だけの返送に適した小さなサイズも用意があります。
ご希望の方は、検査キットの発注時に備考欄にて“小型の返送箱を希望”とご入力ください。

B) UN3373 輸送ボックスを使用して郵送する方法


UN3373 輸送ボックス以外の箱は使用しないでください。郵送が断られる場合がございます。

	<p>1) チューブの蓋がしっかり閉まっていることを確認してください。チューブの周りを市販のアルコール消毒薬で消毒してください。</p>						
	<p>2) チューブを検体搬送用チャック袋（吸収材入り）に入れ、ジップをしっかりと閉じてください。 1袋にチューブは1本のみ入れください。</p>						
	<p>3) UN3373 輸送ボックスを組み立て、この中にチューブ入れた検体搬送用チャック袋（吸収材入り）を入れて、封をしてください。 ※この箱は一度、封をしますと二度と開くことができませんので、ご注意ください。 所定の場所に、事業社名、お客様のお名前を記載してください。</p>						
 <p>※切手は必ず箱正面から見えるように貼り付ける</p>	<p>注) 普通郵便は 2022 年 2 月時点で、最短でも翌々日配達となっており、弊社到着に日数がかかるため、速達 をご利用ください。 ・速達で郵送するには、箱正面の<u>右側に赤マジックで線を引き</u>、上部に赤字で <u>速達</u> と書いてください。 ・普通郵便の料金に、速達料金を追加した分の切手を貼り、郵便局窓口かポストへ投函してください。</p> <table border="1" data-bbox="860 1861 1367 2009"> <thead> <tr> <th>重量</th> <th>料金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>～250 g</td> <td>基本料金 +260 円</td> </tr> <tr> <td>～1Kg</td> <td>基本料金 +350 円</td> </tr> </tbody> </table>	重量	料金	～250 g	基本料金 +260 円	～1Kg	基本料金 +350 円
重量	料金						
～250 g	基本料金 +260 円						
～1Kg	基本料金 +350 円						

C) 輸送用コンテナを使用して搬送する方法

検体数が 50 を超える場合は、輸送用コンテナを使用してください。輸送用コンテナはキットに付属しておりませんので、事前に弊社までお問い合わせください。

	<p>1) チューブの蓋がしっかり閉まっていることを確認してください。チューブの周りを市販のアルコール消毒薬で消毒してください。</p>
	<p>2) チューブを検体搬送用チャック袋（吸収材入り）に入れ、ジップをしっかりと閉じてください。 1袋にチューブは1本のみ入れください。</p> <p>可能であれば、チューブを入れた検体搬送用チャック袋（吸収材入り）を大きめの袋にまとめてください。</p>
	<p>3) 輸送用コンテナに、チューブを入れた検体搬送用チャック袋（吸収材入り）を、まとめた場合はその大きめの袋ごと、中に入れてください（発砲スチロールは取り出さないでください）。 発砲スチロールの蓋はかぶせるだけとし（ガムテープはしないでください）、外側の段ボール部分をガムテープで閉じてください。同梱の宅急便伝票（発払い）に必要事項を記入し、ご返送ください。</p>
	<p>4) 輸送用コンテナに入らない検体は、UN3373 輸送ボックスを組み立て、この中にチューブ入れた検体搬送用チャック袋（吸収材入り）を入れて、封をしてください。</p> <p>※この箱は一度、封をしますと二度と開くことができなくなりますので、ご注意ください。</p> <p>所定の場所に、事業社名、お客様のお名前を記載してください。</p>

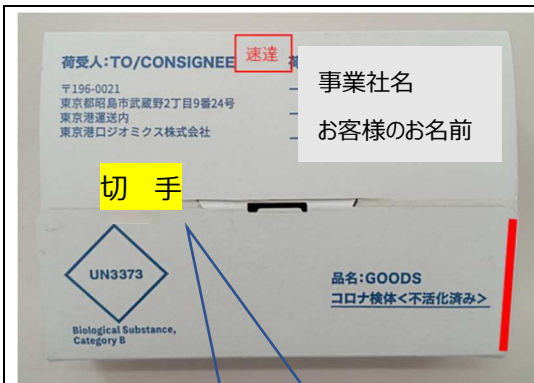

※切手は必ず箱正面から
見えるように貼り付ける

注) 普通郵便は 2022 年 2 月時点で、最短でも翌々日配達となっており、弊社到着に日数がかかるため、**速達** をご利用ください。

・速達で郵送するには、箱正面の右側に赤マシックで線を引き、上部に赤字で **速達** と書いてください。

・普通郵便の料金に、速達料金を追加した分の切手を貼り、郵便局窓口かポストへ投函してください。

重量	料金
~250 g	基本料金 +260 円
~1Kg	基本料金 +350 円